

HYDROTECH

STRAUSBERG GmbH & Co. KG



Intermittierender Katheterismus mit Ergo-Cath

Ihr Ratgeber

HYDROTECH
STRAUSBERG GmbH & Co. KG

Lehmkuhlenring 36
D-15344 Strausberg
Telefon: 0800 - 30 32 012
Telefax: +49 (3341) 30 32 03
E-Mail: info@hydrotech-srb.de

Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK)

Urin ist ein Abfallprodukt aus den Nahrungsmitteln und Getränken, die wir zu uns nehmen. Er sammelt sich in der Blase. Durch die Blasenentleerung scheidet unser Körper diese Abfallstoffe aus. Wir alle müssen daher unsere Blase mehrmals am Tag entleeren. Die meisten von uns scheiden den Urin auf normalem Wege aus, während andere einen Katheter verwenden.

So funktioniert es

Ergo-Cath ist ein Katheter zum Entleeren der Blase. Diese Art der Blasenentleerung nennt man ‚intermittierende Selbstkatheterisierung‘. Intermittierend heißt periodisch mit Unterbrechungen und bedeutet hier, dass die Blase einige Male im Laufe eines Tages geleert wird. Katheterisierung bezeichnet die Methode selbst, nämlich das Verwenden eines Katheters.

Und so wird es gemacht:

Der Ergo - Cath Katheter wird in die Harnröhre (Urethra) eingeführt und bis in die Blase geschoben. Wenn der Urin herauszufließen beginnt, schiebt man den Katheter noch ein klein wenig weiter. In dieser Position verbleibt der Katheter bis kein Urin mehr herausfließt. Schließlich wird der Katheter langsam wieder herausgezogen.



HYDROTECH
STRAUSBERG GmbH & Co. KG

Lehmkuhlenring 36
D-15344 Strausberg
Telefon: 0800 - 30 32 012
Telefax: +49 (3341) 30 32 03
E-Mail: info@hydrotech-srb.de